


# エスティーム モルダブル

## 使い方 ~貼付方法

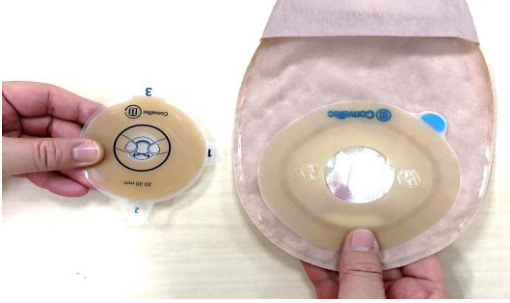


- ① 大きな円状皮膚保護剤の上に、小さな円状モルダブルディスクが仮止めされているので、軽く引っ張り、ディスクをストーマ袋からはずします



- ② ディスクの「1」と書いてあるつまみを持ち上げ、一番上のはくり紙をはがします



- ④ ディスク中央の穴のふちに両手の親指の先を置き、真ん中から外側へ、こするようにして巻き上げて穴を広げていきます

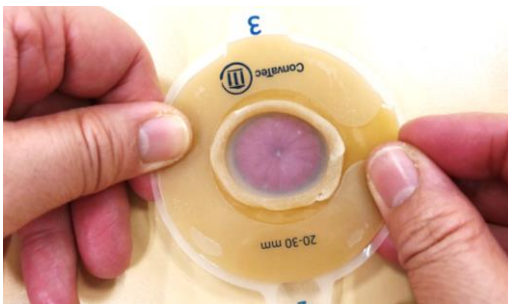

- ⑤ 穴の大きさがストーマよりも大きくなるまで巻き上げます  
ぴったりの大きさでなくても、後で巻き戻るので心配いりません



- ⑥ 「2」と書いてあるつまみを持ちあげ、はくり紙をはがします



- ⑦ ストーマとディスクの穴を合わせてお腹に貼り、指先で皮膚保護剤を軽く押さえます



- ⑧ 「3」と書いてあるつまみを持ち上げ、はくり紙をはがします



- ⑨ ストーマ袋の粘着面のはくり紙をはがします



- ⑩ ストーマ袋の両脇を軽く引っ張って伸ばしながら、ディスクの皮膚保護剤とストーマ袋の粘着面を合わせます



- ⑪ 貼り合わせた部分を30秒程度、手のひらであたためて、十分に粘着させます

©2019 ConvaTec Inc.