

# バリケア ベルト

## 使用方法 ～かけ方・はずし方



### ベルトのかけ方

① ストーマ袋をめくって、ベルトタブを出します



② 指先でつまんで、ベルトタブを起こします



③ 反対側の手で、バリケアベルトのベルトタブを持ちます



④ バリケアベルトのタブの突起を、面板のタブの穴に押し込むようにして入れます



⑤ ストーマ袋とベルトを軽くひっぱって、ベルトがしっかりかかっている事を確認します

もう片側のベルトも同じようにしてかけます



## ベルトのはずし方

⑥ ストーマ袋をめくって、ベルトタブとベルトを出します



⑦ ベルトタブをつまんで起こし、反対側の手でベルトのはしをつまみます



⑧ ベルトタブを起こしたままベルトを引っ張り、ベルトをはずします

もう片側のベルトも同じようにしてはずします

©2019 ConvaTec Inc.