



災害時の備えについて




まずは十分な準備をしましょう

【避難時に持ち出す装具の用意】

- 避難時の『手持ち用装具』として、装具・アクセサリ類を2週間分まとめ、面板はストーマサイズに合わせて穴をあけておきましょう。
- 日頃から『緊急交換用装具』として、日頃使用している装具のセットを1〜2組持ち歩くようにしましょう。

〈 洗腸している人の注意 〉

- 災害時は、洗腸場所や水の確保が困難になります。自然排便でのケアもできると安心です。

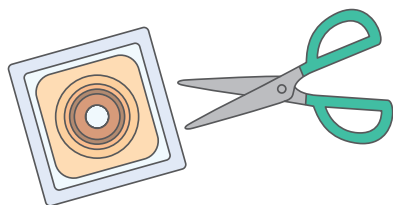

災害へ備えるポイント

【持ち出す装具の保管方法】

- 『手持ち用装具』は、非常持出用としてすぐ持ち出すことができる安全な場所に保管し、できれば複数箇所に分散しておくといでしょう。また、中身は定期的に変換しましょう。



【緊急連絡用の携帯メモを作る】

- 災害時の緊急連絡用として、別添のストーマの記録に記入し、携帯メモとして普段から持ち歩くことにしましょう。
- 携帯メモは、コピーしておき『手持ち用装具』および『緊急交換用装具』と一緒にしておきましょう。

災害発生時の行動について

【避難するときは】


- 『緊急交換用装具』は、衣服のポケットなどに入れて肌身から離さず所持しましょう。
- 『手持ち用装具』を身体障害者手帳などと一緒に、避難所へ持ち出して身近に置いておきましょう。携帯電話・充電器、懐中電灯、ペットボトルなど非常用物品と一緒に『非常持ち出し袋』(リュックサック)に入れておくのがよいでしょう。



【オストメイト仲間と連絡を】

- 災害時には、相互の連絡により、安否確認、励まし合い、情報交換、装具の融通など協力しあえる仲間を作っておく事も重要です。

公益社団法人 日本オストミー協会 (JOA)
 TEL: 03-5670-7681
 FAX: 03-5670-7682
 ホームページ: <http://www.joa-net.org/>

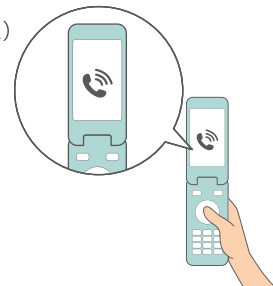

【装具の緊急調達】

- 避難所で装具の手持ち分が少なくなった時は、ストーマ装具販売店、救護所、メーカーへ連絡して、ストーマ装具の調達について相談してください。
- 電話および携帯電話・その他の通信等が復旧するまで時間を要する場合も考えられます。その際には別添の「緊急連絡はがき」を使用していただくか、または相談窓口にメールして、避難所・使用している装具などの状況をお知らせください。郵便やメールの方が早く対応できる場合もありますので、1つの手段としてご使用ください。

コンバテック お客様相談窓口


0120-532384

cvt sodan.japan@convatec.com



はさみ無しで、ストーマの大きさに穴を広げられる面板 コンバテック モルダブル テクノロジー™

- はさみ不要、手指でストーマの大きさに面板の穴を広げられます
- 広げた穴はストーマの大きさまで巻き戻りタートルネックのように密着するので、排泄物のもぐり込みを防ぎます

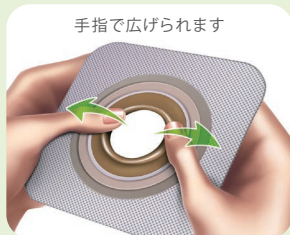

「災害時にも適していると思います」

コンバテックのモルダブルは、はさみを使わなくてよいので、災害の時の非常用装具としても適しているのではないのでしょうか

宮城大学名誉教授・ETナース 徳永 恵子 先生

二品系の「モルダブル」シリーズは

- 面板を貼付したままで、ストーマ袋だけ取り替えられます。
- 「コロストミー」「イレオストミー」「ウロストミー」の全てに対応しています。
- 中長期使用に適した皮膚保護剤「デュラヘーシブ」、標準使用に適した皮膚保護剤「バリケア」から選べます
- 「平面」仕様製品と、ストーマの高さがあまりない(0.5cm程度)場合に適した「凸面」仕様製品があります。
- 浮動型の「アコーディオン」仕様製品があります。

二品系「モルダブル」面板（一例）



二品系平面



二品系アコーディオン

二品系ストーマ袋（一例）



消化管ストーマ用



イレオストミー用



ウロストミー用

※本製品の仕様が適さないストーマもあります(高さが0.5cm未満の場合、またはお腹よりくぼんでいる場合)

単品系の「モルダブル」シリーズは

- 貼付部分に固さを感じないので、自然な使用感です。
- 消化管ストーマに対応しています。
- 標準使用に適した皮膚保護剤「バリケア」を使用しています。
- 「平面」仕様製品です。

※本製品の仕様が適さないストーマもあります
(高さが1cm未満の場合、またはお腹よりくぼんでいる場合)

単品系「モルダブル」製品



お腹側



透明



肌色

排泄物のニオイの元を分解する、消臭スプレー

パナソニック「ニオフ 消臭スプレー」シリーズ

- 便臭、尿臭の元を、亜鉛イオンの作用で分解します
- 除菌効果で、菌によるニオイの発生を抑えます
- 5つの安全性試験にクリア、無臭なので、いつでもどこでもお使いいただけます
- 携帯に便利な50mL、日常使用に適した200mLなど計3サイズ



製品に関するお問い合わせは、コンバテック お客様相談窓口までお願い致します。