

二品系モルダブル面板（平面）

開口部の広げ方



※ 裏面のはくり紙ははがさずに行います


① 面板中央の穴のふちに親指の先を置きます



② 親指で穴の真ん中から外側へ、こするようにして巻き上げて穴を広げていきます



③ 面板を回転させながら、②の動作を繰り返して、穴を広げていきます

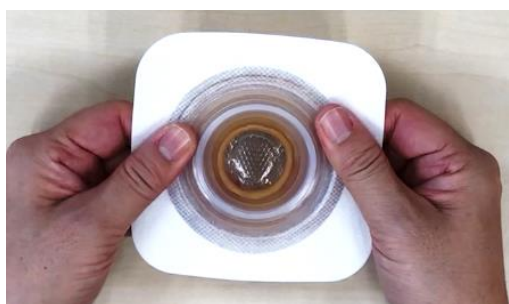

④ 穴の大きさがストーマよりも大きくなるまで巻き上げます
ぴったりの大きさでなくても、後で巻き戻るので心配いりません

©2019 ConvaTec Inc.