

二品系モルダブル面板（凸面）

開口部の広げ方



- ①（準備）裏面のはくり紙が貼ってある側を表にして、ストーマの大きさを描いておきます



- ② 面板をひっくり返し、皮膚保護剤が露出している方を上にします



- ③ はくり紙の中央を少し指先で押しえておくと、後で、穴を広げやすくなります



- ④ 面板中央の穴のふちに親指の先を置きます



⑤ 親指で穴の真ん中から外側へ、こするようにして巻き上げて穴を広げていきます。



⑥ 面板を回転させながら、⑤の動作を繰り返して、穴を広げていきます。



⑦ 穴の大きさがストーマよりも大きくなるまで巻き上げます
ぴったりの大きさでなくても、後で巻き戻るので心配いりません

